



ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ + ΠΟΛΥΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

REGENYAL
ΑΡΜΟΝΙΑ

Φροντίστε τον εαυτό σας
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ • ΟΓΚΟΣ • ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ

+

ΠΟΛΥΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟ
ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ • ΟΓΚΟΣ • ΑΝΑΠΛΑΣΗ



REGENYAL
ARMONIA

REGENYAL ARMONIA

Διασταυρωμένο
+ Πολυκλασματικό παρεμβαλλόμενο
Υαλουρονικό Οξύ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ • ΟΓΚΟΣ • ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Καθώς μεγαλώνουμε, το δέρμα χάνει τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητά του.

Η γήρανση επηρεάζει όχι μόνο το πρόσωπο και το σώμα
αλλά και την **ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ**.

Καθώς οι άνδρες και οι γυναίκες μεγαλώνουν, εμφανίζονται
φυσιολογικές ορμονικές αλλαγές, με σημαντικές σωματικές
και ψυχολογικές αλλαγές που μπορεί συχνά να επηρεάσουν
την κοινωνική και σεξουαλική τους ζωή.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Τώρα είναι δυνατόν να δράσουμε ενάντια στη διαδικασία γήρανσης
των **ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**, διορθώνοντας τις **ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ**
και **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ**.

Η ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ και **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ** του χαμένου **ΟΓΚΟΥ**
των γεννητικών οργάνων είναι πλέον δυνατές
με το **REGENYAL ARMONIA**



REGENYAL ARMONIA

Διασταυρωμένο
+ Πολυκλασματικό παρεμβαλλόμενο
Υαλουρονικό Οξύ



ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ • ΟΓΚΟΣ • ΑΝΑΠΛΑΣΗ



με
Διασταυρωμένο και
Πολυκλασματικό
Παρεμβαλλόμενο
Υαλουρονικό Οξύ

BIORIVOLUMETRIA

Τα προϊόντα της Biorivolumetria είναι μονοφασικά τζελ που παράγονται μέσα από τη διαδικασία "ΗΠΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ" των μορίων Υαλουρονικού Οξέος διαφορετικού βάρους. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τη λήψη μιας 3D μεσοκυττάριας ουσίας με βέλτιστο ιξώδες. Η χαμηλή θερμοκρασία περιορίζει τον αποπολυμερισμό της πρώτης ύλης υαλουρονικού νατρίου, διατηρώντας τις ρεολογικές του ιδιότητες και μειώνοντας τις απαραίτητες ποσότητες του αντιδραστηρίου διασταύρωσης.

Σε σύγκριση με τα συνηθισμένα εμφυτεύματα (fillers), τα σωματίδια είναι μικρότερα, γεγονός που βοηθά το προϊόν να ενσωματωθεί και να διανεμηθεί καλύτερα στους ιστούς, παρέχοντας ένα φυσικό διορθωτικό αποτέλεσμα.

Η καινοτόμος διαδικασία κατασκευής καθιστά δυνατή τη χρήση μικρότερων ποσοτήτων του παράγοντα διασταύρωσης (BDDE), σε σύγκριση με τα κοινά εμφυτεύματα με ίσο βαθμό ιξώδους (κατά μέσο όρο 30% λιγότερο). Αυτό εγγυάται ένα ελεύθερο διασταυρωμένο υπόλειμμα <0,1 PPM.

REGENYAL
LABORATORIES

REGENYAL ΑΡΜΟΝΙΑ

Διασταυρωμένο

+ Πολυκλασματικό παρεμβαλλόμενο
Υαλουρονικό Οξύ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ REGENYAL

Δουλεύουμε πάνω στην **ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ**, την **ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ**, τη **ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ** και τη **ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ**. Στα εργαστήρια της Regenyal, το πιστοποιημένο προσωπικό μελετά, αναπτύσσει και παράγει νέα προϊόντα σε συνεργασία με τα κορυφαία Ιταλικά πανεπιστήμια.

Χρησιμοποιούνται μόνο πρώτες ύλες **ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ** και **ΞΕΛΙ-ΡΕΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ** (από τη FIDIA FARMACEUTICI), λειτουργώντας σύμφωνα με το πρότυπο **GREEN INJECTION**.

Η ιδέα της **ΟΜΟΡΦΙΑΣ** σχετίζεται στενά με το **ΣΕΒΑΣΜΟ** προς τη **ΦΥΣΗ**, επομένως έχουμε δημιουργήσει μια οικολογικά βιώσιμη αλυσίδα παραγωγής, με αποκλειστικές και κατοχυρωμένες τεχνολογίες. Αποστολή μας είναι η **ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ** αποκαθιστώντας την **ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ**, για καλύτερη **ΥΓΕΙΑ** μέσα και έξω.

- ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
- ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΤΥΠΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001 - Διεθνές Πρότυπο για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 13485 - Διεθνές Πρότυπο σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας που αναφέρονται σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα

ISO 14001 - Διεθνές Πρότυπο για Συστήματα Οργανωτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ - Εκδόθηκε από τον κοινοποιημένο οργανισμό 0373 (Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας)

Κατασκευασμένο και κατοχυρωμένο στην Ιταλία

Τα προϊόντα της Regenyal Laboratories κατασκευάζονται αποκλειστικά στην Ιταλία. Το διασταυρωμένο υαλουρονικό οξύ σε συνδυασμό με το παρεμβαλλόμενο πολυκλασματικό συστατικό εγγυάται ένα άμεσο μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Το παρεμβαλλόμενο υαλουρονικό οξύ προστατεύεται από την ενζυματική αποδόμηση και επομένως απελευθερώνεται αργά. Η μεσοκυττάρια ουσία της Βιοϊνολυμετρία προάγει την αύξηση του όγκου και παρέχει δερματική και υποδερμική διέγερση.

Στο πολυκλασματικό συστατικό:

- Τα θραύσματα χαμηλού μοριακού βάρους (2 χιλιάδες Daltons) εκτελούν τη δράση **ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ** διεγείροντας τα ενδοθηλιακά κύτταρα, προωθώντας την παραγωγή νεοαγγειογένεσης και κολλαγόνου.
- Τα θραύσματα μεσαίου μοριακού βάρους (500 χιλιάδες, 200 χιλιάδες και 100 χιλιάδες Daltons) προάγουν τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών και των επιδερμικών βασικών κυττάρων, παρέχοντας στη γέλη ιδιότητες **ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ**.
- Τα συστατικά υψηλού μοριακού βάρους παρέχουν ενυδατικές και προστατευτικές ιδιότητες που προσελκύουν τα μόρια νερού και συνεπώς εξουδετερώνουν την ξηρότητα, συλλαμβάνουν τις ελεύθερες ρίζες και προάγουν τις μεταβολικές ανταλλαγές.



MADE IN ITALY



REGENYAL ARMONIA

Διασταυρωμένο

+ Πολυκλασματικό παρεμβαλλόμενο
Υαλουρονικό Οξύ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ • ΟΓΚΟΣ • ΑΝΑΠΛΑΣΗ



Κάθε συσκευασία περιέχει

- 1 x 3 ml προγεμισμένη σύριγγα Διασταυρωμένο Υαλουρονικό Οξύ 25 mg/g
- 1 βελόνα και 1 αποστειρωμένη κάνουλα (CE0123)

Διάρκεια θεραπείας

- 5-6 μήνες

Τι είναι το Regenyal ARMONIA;

Το Armonia είναι ένα ενέσιμο τζελ φτιαγμένο από διασταυρωμένο Υαλουρονικό οξύ με ένα ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΛΥΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟ συστατικό. Πρόκειται για ένα βιοσυμβατό και βιοαπορροφήσιμο ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας III ΕΚ (αποστειρωμένο, μη πυρετογόνο, ισο-ωσμωτικό και ισοτονικό τζελ) που χρησιμοποιείται στα εξωτερικά αρσενικά και θηλυκά γεννητικά όργανα:

- Διορθώνει και γεμίζει την υποτροφία και τις ασυμμετρίες.

- Αποκαθιστά τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα στους περινεϊκούς και κολπικούς ιστούς.
- Δίνει όγκο και ενυδάτωση τόσο στα χείλη όσο και το αιδοίο.
- Μειώνει την κολπική ξηρότητα με επακόλουθη βελτίωση του κολπικού βλενογόνου και αυξημένη λίπανση.
- Βοηθά στην επούλωση των ουλών μετά τον τοκετό και την περινεοτομία.
- Αυξάνει τον όγκο και την περιφέρεια του πέους.
- Συμβάλλει στη θεραπεία της πρόωρης εκσπερμάτωσης.

REGENYAL
LABORATORIES

REGENYAL ARMONIA

Διασταυρωμένο

+ Πολυκλασματικό παρεμβαλλόμενο
Υαλουρονικό Οξύ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ • ΟΓΚΟΣ • ΑΝΑΠΛΑΣΗ



Κύριες ενδείξεις

- Θεραπεία τροφικών, λειτουργικών, μορφολογικών και σεξουαλικών αλλοιώσεων στις περιοχές των αρσενικών και θηλυκών γεννητικών οργάνων
- Ογκομετρική αύξηση του εφηβαίου
- Υποτροφία και ατροφία των μεγάλων χειλιών του αιδοίου

Γιατί να επιλέξετε το Regenyal ARMONIA

Το Regenyal **ARMONIA** είναι μία **ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ** διορθωτική θεραπεία των ανδρικών και θηλυκών γεννητικών οργάνων. Δεδομένου ότι δεν πρόκειται για μία επεμβατική θεραπεία, δεν απαιτείται μεγάλη περίοδος ανάρρωσης. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο και ασφαλές. Με την ηλικία ή μετά τον τοκετό ή την εμμηνόπαυση, τα μεγάλα χείλη του αιδοίου μπορεί να χάσουν τη σφριγηλότητα και τον όγκο τους. Συχνά, αυτές οι αλλαγές οδηγούν τις γυναίκες σε αισθητικές ανησυχίες, δημιουργώντας λειτουργικό αντίκτυπο.

Οι άνδρες επηρεάζονται επίσης από τη γήρανση των γεννητικών τους οργάνων και αυτή η ανησυχία μπορεί να επηρεάσει τη σεξουαλική τους ζωή. Οι ατέλειες της αρσενικής και γυναικείας γεννητικής περιοχής αποτελούν πηγή αμηχανίας, κυρίως **ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ** και συχνά προκαλούν απώλεια αυτοεκτίμησης η οποία μπορεί να προκαλέσει απώλεια της **ΛΙΜΠΙΝΤΟ** και μείωση της **ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**.

Μια θεραπεία που στοχεύει στην αύξηση του όγκου των γεννητικών οργάνων μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της αυτοπεποίθησης και να σας επιτρέψει να ζήσετε τη σεξουαλικότητά σας με γαλήνη.





REGENYAL
ARMONIA


*Αρμονία δεν είναι η απόκτηση αυτιών που επιθυμείτε...
αλλά η βελτίωση αυτιών που έχετε.*

REGENYAL ARMONIA

Διασταυρωμένο

+ Πολυκλασματικό παρεμβαλλόμενο
Υαλουρονικό Οξύ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ • ΟΓΚΟΣ • ΑΝΑΠΛΑΣΗ

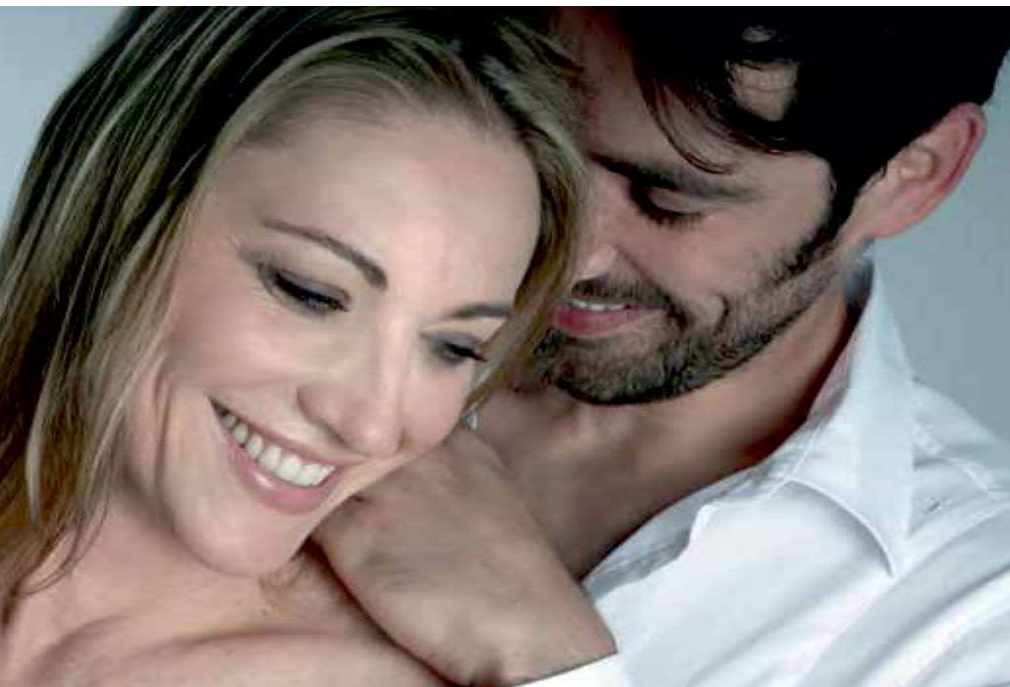

Αποτελέσματα

- Ενυδάτωση της αιδοιοκολπικής περιοχής
- Καταπραϋντική αίσθηση ερεθισμένων περιοχών
- Βελτίωση των βλεννογόνων των γεννητικών οργάνων και αναγέννηση των ιστών

Υαλουρονικό οξύ

Ένα βασικό φυσικό συστατικό του δέρματος και του βλεννογόνου. Κατά τη διαδικασία της φυσιολογικής γήρανσης, ή σε περίπτωση ειδικών παθολογικών καταστάσεων, η παραγωγή του υαλουρονικού οξέος τείνει να μειώνεται, γεγονός που προκαλεί τη γήρανση του δέρματος, με αποτέλεσμα την απώλεια όγκου και ελαστικότητας.

Το υαλουρονικό οξύ δρα ως σφουγγάρι. Διατηρώντας το νερό, βελτιώνει διαρκώς την ενυδάτωση, την απαλότητα και τον τόνο του δέρματος. Το Regenyal Armonia είναι ένα προϊόν αναδιαμόρφω-

σης των γεννητικών οργάνων με

25mg/g συγκέντρωση Υαλουρονικού οξέος, από την οποία το 12% αποτελείται από παρεμβαλλόμενο θραύσμα, συστατικό που εξασφαλίζει τη βιολογική του δραστηριότητα. Το υαλουρονικό οξύ που χρησιμοποιείται είναι αποτέλεσμα ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ. Είναι ΜΗ ΖΩΙΚΗΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΓΝΗΣ και ΒΙΟ-ΣΥΜΒΑΤΗΣ προέλευσης.

Η απόλυτη απουσία νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών διασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια του Regenyal Armonia.

REGENYAL
LABORATORIES

Υαλουρονικό Οξύ

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ



ΠΟΛΥΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

2

ΜΟΡΙΑΚΑ ΒΑΡΗ

500 Χιλιάδες Daltons + 1 Εκατομμύριο Daltons



ΠΟΛΥΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟ
ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ 12%

5

ΜΟΡΙΑΚΑ ΒΑΡΗ


2 Χιλιάδες Daltons + 100 Χιλιάδες Daltons + 200 Χιλιάδες Daltons + 500 Χιλιάδες Daltons + 1 Εκατομμύριο Daltons



Η ΘΡΑΥΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ **ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ** ΚΑΙ **ΥΠΕΡΗΧΟΥ** ΣΕ ΕΝΑ **ΥΨΗΛΑ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ** ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΛΑΣΜΑ ΤΩΝ **1 M DALTONS**

REGENYAL
LABORATORIES

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

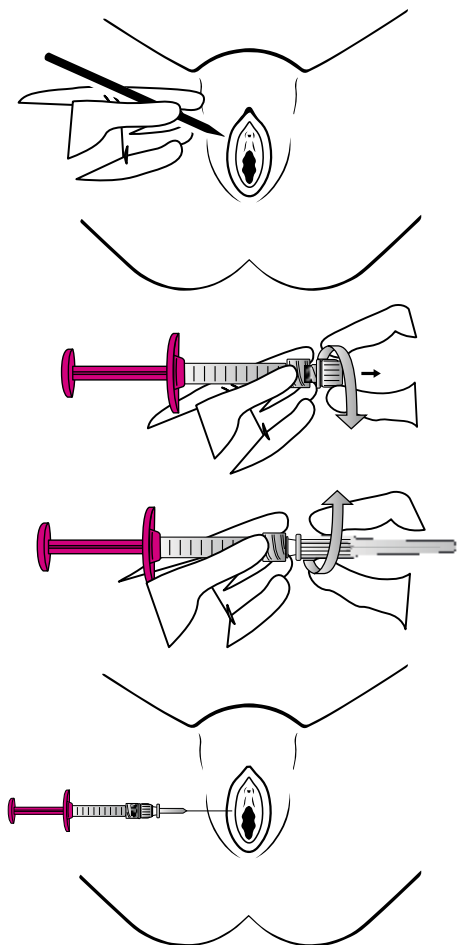

Μαρκάρετε την περιοχή προς θεραπεία η οποία θα πρέπει να προσδιοριστεί τοποθετώντας τον ασθενή μπροστά στον καθρέφτη ή ξαπλωμένο στο κρεβάτι θεραπείας.

Απολυμάνετε το σημείο που θα γίνει η έγχυση με το κατάλληλο διάλυμα.

Αφαιρέστε το καπάκι από τη σύριγγα και εισάγετε τη βελόνα ή την κάνουλα, προσέχοντας να τις βιδώσετε στο βιδωτό έμβολο (luer lock) της σύριγγας.

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας/κάνουλας. Κρατήστε τη σύριγγα με εργονομικό τρόπο και ξεκινήστε την έγχυση του προϊόντος ακολουθώντας τις γραμμές που έχετε ήδη σχεδιάσει. Οι τεχνικές έγχυσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το αποτέλεσμα που πρέπει να ληφθεί.

ΜΕΓΑΛΑ ΧΕΙΛΗ

ΕΝΕΣΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΔΕΡΜΑ

(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΧΕΙΛΗ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)


Θεραπεία με κάνουλα

- ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΠΟ 23G ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΑΠΟ 25G
- ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ
- ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΕΙΛΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΒΙΚΟ ΛΟΦΙΣΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ.

• ΤΕΧΝΙΚΗ: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΡΣΗ


Θεραπεία με βελόνα

- ΒΕΛΟΝΑ 30G
 - ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
- #### • ΤΕΧΝΙΚΗ: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΡΣΗ

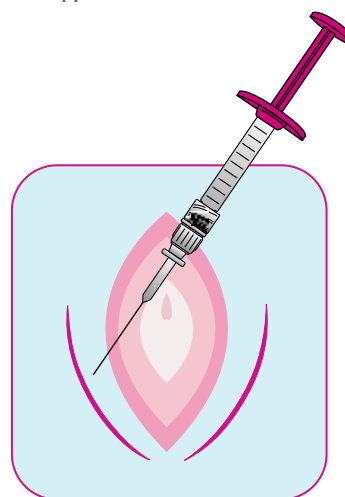


ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ

- ΠΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΑΠΟ 0,5 ΕΩΣ 1 ΜΜ ΒΑΘΟΣ
 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΘΟΛΙΝΕΙΟΥΣ ΑΔΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 - ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΗ ΣΥΜΠΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ
 - ΒΕΛΟΝΑ 30G
 - ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 2CM ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ.
- #### • ΤΕΧΝΙΚΗ: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΡΣΗ / ΜΙΚΡΟΙ ΒΟΛΟΙ

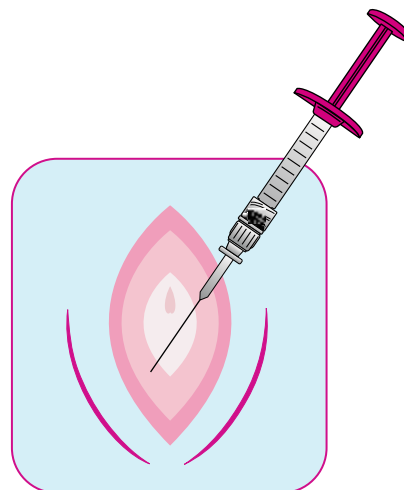

Τεχνική INTROITAL TONGUE®

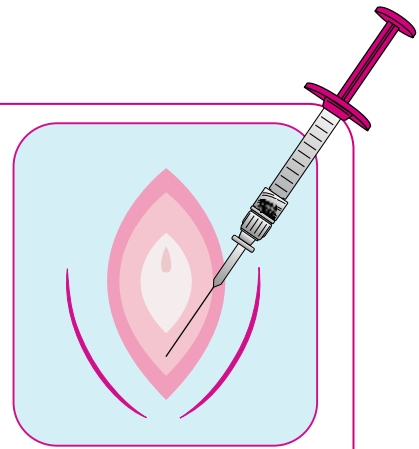

ΤΙ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ **INTROITAL TONGUE®** ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΟΖΓUR LEYLEK.

ΓΙΑΤΙ: ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΝΕΪΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΥ: ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΕΝΙΚΟ ΤΟΞΟ, ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΙΚΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΝΕΪΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΑΝ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ.

ΠΩΣ: ΕΓΧΥΣΗ 2-3 ML 25 MG / GR ΠΟΛΥΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ARMONIA®).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ, ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ INTROITAL TONGUE®, ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΝΕΪΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗ ΣΤΟ ΥΜΕΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΣΜΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ

Η θεραπεία με το Regenal Armonia μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εμπειρογνώμονα ιατρό (για παράδειγμα γυναικολόγο ή ανδρολόγο), μετά από επαρκή αξιολόγηση της κλινικής περίπτωσης του ασθενούς, για τυχόν αλλεργίες και θεραπείες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μπορεί να χρειαστεί προ-θεραπεία του ασθενούς με κολλικά υπόθετα με αντισηπτική δράση. Δεν συνιστάται η αποτρίχωση της περιοχής με ξυράφι, καθώς το δέρμα μπορεί να ερεθιστεί, **Η ΗΠΙΑ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.**

Ο ασθενής, μετά από ενημερωμένη συγκατάθεση, ειδοποιείται για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκύψουν στο σημείο της έγχυσης, ελαφριά και παροδική φλεγμονή όπως αιμάτωμα, εκχυμώσεις, οζίδια και μικρές αποφράξεις των αδένων του δέρματος.

Κατά την κρίση του γιατρού, **ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ** πριν από τη θεραπεία προκειμένου να περιοριστεί η ενόχληση της έγχυσης. Η χρήση του Regenal Armonia αντενδείκνυται σε έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα ή ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά, ασθενείς με προηγούμενη υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά και ασθενείς με υποτροπιάζουσες φλεγμονές και/ή ιογενείς (για παράδειγμα Papilloma, Herpes), βακτηριακές, μυκητιασικές λοιμώξεις (για παράδειγμα μυκητίαση, καντιντίαση).


REGENAL ARMONIA

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΕΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ Υαλουρονικό Οξύ	1 ML	1 M DALTONS + 500 K DALTONS ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ + 12% ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 2 ΧΙΛΙΑΔΕΣ DALTONS 100 ΧΙΛΙΑΔΕΣ DALTONS 200 ΧΙΛΙΑΔΕΣ DALTONS 500 ΧΙΛΙΑΔΕΣ DALTONS 1 EK. DALTONS	25 MG/G	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ	2 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ BDDE <0,1 PPM	3 ΒΕΛΟΝΕΣ + 1 ΚΑΝΟΥΛΑ	5-6 ΜΗΝΕΣ	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΔΙΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΠΡΑΪΝΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ ΙΣΤΩΝ	ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΕΦΗΒΑΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΙΔΙΟΥ

GREEN INJECTIONS

ΠΡΟΪΟΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

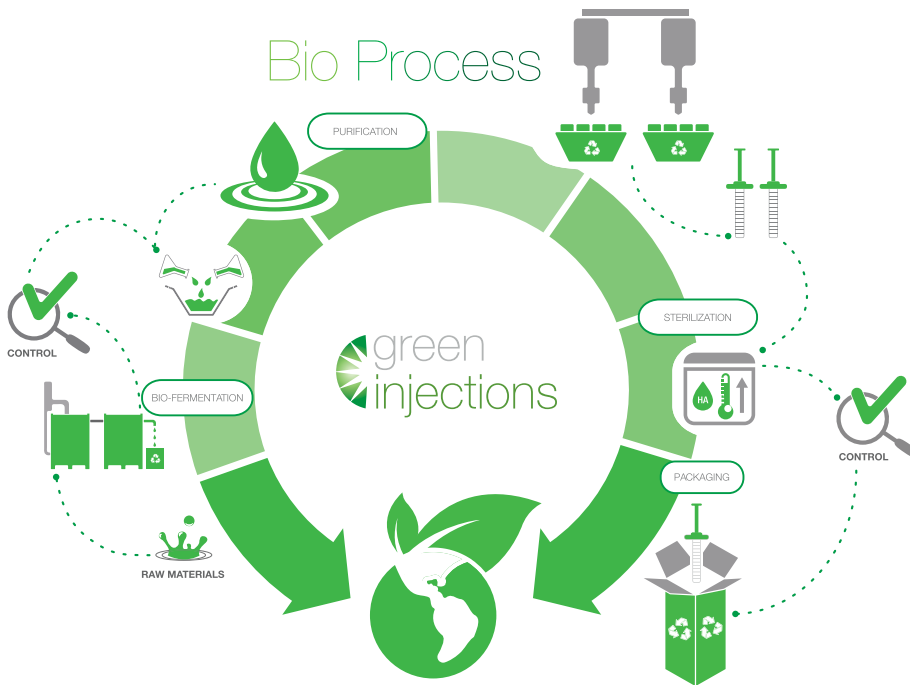

GREEN INJECTIONS

Πρόκειται για ένα διεθνές πρότυπο που ισχύει για τα ενέσιμα προϊόντα, σχετικά με την ασφάλειά τους, τη φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία παραγωγής και τις τεχνικές που αποσκοπούν στη λήψη φυσικών αποτελεσμάτων και τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς με την πάροδο του χρόνου.

Οι GREEN INJECTIONS (ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ) είναι:

ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προϊόντα υψηλής ποιότητας που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας το καθαρότερο υαλουρονικό οξύ, με ελάχιστα επίπεδα εξωτερικών χημικών ουσιών.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Προϊόντα νέας γενιάς που κατασκευάζονται στην Ιταλία, σύμφωνα με τους αυστηρότερους κανόνες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος: περιορισμός των αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας, καθαρισμός νερού, ανακύκλωση απορριμμάτων, χρήση εξοπλισμού χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (Πιστοποιημένα από το ISO 14001)

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Τεχνικές έγχυσης με βελόνες που αναπτύχθηκαν από εμπειρογνώμονες ιατρικής, οι οποίες εγγυώνται υψηλή απόδοση και ασφαλείς θεραπείες, ενώ ο κίνδυνος επιπλοκών στις «δύσκολες περιοχές» μειώνεται στο ελάχιστο.

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οπτικές «οικολογικές» διορθώσεις που διασφαλίζουν την επίτευξη εντελώς φυσικών αποτελεσμάτων.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Meyer LJ, Stern R., Age-Dependent Changes of Hyaluronan in Human Skin. *J Invest Derm* 1994; 102(3):385-9
2. Gh et Lotti T Campanile G, Grappone C, Dini G. Hyaluronic acid in cutaneous intrinsic aging. *Int J Derm* 1994; 33(2):11
3. Goa KL, Benfield P., Hyaluronic Acid: a review of its pharmacology and use a surgical Aid in ophthalmology, an d its therapeutic potential in joint disease and wound healing. *Drugs* 1994 ; 47(3):536-66
4. Kee CM, Penno MB, Cowman M et Al. Hyaluronan (HA) fragments induce chemokine gene expression in alveolar macrophages. The role of HA size and CD44. *J Clin Invest* 1996; 98(10):2403-13.
5. Tawada A, Masa T et Al. Large-scale preparation, purification, and characterization of hyaluronan oligosaccharides from 4-mers to 52 mers. *Glycobiology* 2002 Jul; 12(7):421 -6.
6. Presti D, Scott J., Hyaluronan-mediated protective effect against cell damage caused by enzymatically produced hydroxyl (OH) radicals dependent on hyaluronan molecular mass. *Cell Biochem. Funct* 12:281, 1994
7. Alessandrini A, Biorivolumetria products volume and regeneration. *P Int J of Aest Med* 2015 Mar; Vol. 5:78-79
8. Alessandrini A, Zazzetta M. Biorivolumetria seen under a microscope. In vitro tests to evaluate regenerative effect of Biorivolumetria products. *La Med Estet* 2015 July-Sept; Vol 3
9. Grimaldi EF, Restaino S, et al. Role of high molecular weight hyaluronic acid in postmenopausal vaginal discomfort. *Minerva Ginecol.* 2012 Aug; 64(4):321-9.
10. Levine KB1, Williams RE, Hartmann KE. Vulvovaginal atrophy is strongly associated with female sexual dysfunction among sexually active postmenopausal women *Menopause.* 2008 Jul-Aug; 15(4 Pt 1):6 61-6
11. Ca one L, Iovenitti P, Postoperative adhesion prevention in gynecologic surgery with hyaluronic acid. *Clin Exp. Obstet. Gynecol.* Jan 2004, 31(1):39-41
12. Fasola E., Gazzola R., Labia Majora Augmentation with Hyaluronic Acid Filler: Technique and Results. *Aesthet Surg J.* 2016 Nov; 36(10):1155-1163
13. Olivia C, Fasola E., Perella E., Fiorelli C., Sacucci S., M230 Blindly cross-linked hyaluronic acid infiltration in cosmetic and functional treatment of vulvo-vaginal atrophy. *Int J of Gyn & Obst* 2012; S531-S867;
14. Becker LC., Bergfeld WF., Belsito Dv., et al., Final report of the safety assessment of hyaluronic acid, potassium hyaluronate, and sodium hyaluronate. *Int J Toxicol.* 2009 Jul-Aug; 28(4 Suppl):5-67
15. Iannitti T, Bingöl A. Ö., Rottigni V, Palmieri B. A new highly viscoelastic hyaluronic acid gel: rheological properties, biocompatibility and clinical investigation in esthetic and restorative surgery. *Int J Pharma* Nov 2013; 456(2):583-592
16. Poramede N., Hyaluronic acid injection. *Ann Dermatol Venerol* 2009; 6:287
17. Kim J J., Kwak TI, Jeon BG and Moon DG, Human glans penis augmentation using injectable hyaluronic acid gel. *Int J of Impot Research* 2003; 15:439-443
18. TI Kwak, Oh M, JJ Kim DG Moon, The effects of penile girth enhancement using injectable hyaluronic acid gel, a filler. *J sex med.* 2011 Dec; 8(12):3407-13



EC CERTIFICATIONS
ISO 14001 - ISO 9001 - ISO 13485

REGENYAL
ARMONIA

Φροντίστε τον εαυτό σας
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ • ΟΓΚΟΣ • ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ + ΠΟΛΥΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

REGENYAL
LABORATORIES

Για περισσότερες
επιστημονικές πληροφορίες
επισκεφθείτε το site μας:

www.vyamedica.gr



REGENYAL
ARMONIA

Διασταυρωμένο
+ Πολυκλασματικό παρεμβαλλόμενο
Υαλουρονικό Οξύ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ • ΟΓΚΟΣ • ΑΝΑΠΛΑΣΗ



Η εταιρεία φαρμακευτικών ειδών και προϊόντων **VYAMEDICA** που εδρεύει στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την πολυεθνική ιταλική εταιρεία Regenyal Laboratories S.r.l η οποία παράγει ενέσιμα προϊόντα υαλουρονικού για την ορθοπεδική ιατρική, αισθητική, στοματολογία και την γυναικολογία σύμφωνα με όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πιστοποιήσεις, τα οποία καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών που θέλουν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους ταχύτατους ρυθμούς και τις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας.

Ελληνικής Αεροπορίας 14Α, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

+30 2310 805871

+30 6976 946961

+30 2310 383761

www.vyamedica.gr

info@vyamedica.gr

[vyamedica](https://www.facebook.com/vyamedica)